

**1. Produktbezeichnung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage

**2. Produktbeschreibung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage gehört zum therapeutischen Standard bei der Behandlung sowohl frischer und sezernierender als auch sekundär heilender Wunden. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist eine sterile feuchte Wundauflage auf Basis einer neutralen Öl-in-Wasser-Emulsion

**3. Produktzusammensetzung**

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseide), getränkt mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus:

- Vaselineum album (White Petrolatum gem. USPXXII)
- Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998)
- Sorbitansesquioleat
- Aqua purificata (Ph. Eur.)

**4. Wirkungsweise**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage schafft die Voraussetzung für eine rasche und ungestörte Wundheilung.

Die spezielle Gewirkstruktur mit einer Maschenbreite von 1 mm x 1 mm und die besonders glatten, feinen Celluloseacetatfasern, die in ihren physikalischen Eigenschaften denen der Naturseide entsprechen, verhindert ein Durchwachsen (Einsprossen) von Granulationsgewebe und dadurch ein Verkleben der Wundauflage mit dem Wundsekret.

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage paßt sich der Wunde exzellent an. Durch einen „Tunneleffekt“ kann das Wundexsudat ungestört die feinmaschige Struktur passieren und wird in die darüber liegende Kompresse (Sekundärverband) abgeleitet, ohne die Poren des Gewirkes zu verstopfen. Die optimal dosierte Menge an Öl-in-Wasser-Emulsion trägt weiter zur Reduktion von Verklebungen bei. Die Emulsion ist so fixiert, dass eine Abgabe auf die Wunde nicht erfolgt.

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage schützt die Wunde vor thermischen und physikalischen Reizungen und vor Austrocknen. Mazerationen wird vorgebeugt. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage hilft, neu gebildetes Gewebe zu schützen. Sie kann mehrere Tage auf der Wunde belassen werden (nur der Sekundärverband wird täglich gewechselt) und gewährleistet einen schmerzfreien atraumatischen Verbandwechsel.

**5. Indikation**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer

Verbandwechsel angezeigt ist – schwach bis stark sezernierende Wunden.

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades,
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- diabetischer Fuss
- Abzessen und Ekzemen
- Verbrühungen und Verätzungen
- Nagelextraktion
- Schürf- und Risswunden
- sowie chirurgischen Nähten.
- für Spender- und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

**6. Gegenanzeigen**

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe von ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage sollte ADAPTIC\* nicht angewendet werden.

**7. Nebenwirkungen**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist im allgemeinen sehr gut verträglich. In sehr seltenen Fällen können bei disponierten Patienten durch Polysorbat 80 (Tween 80) Hautunverträglichkeiten auftreten, die nach Absetzen der Behandlung rasch wieder abklingen.

**8. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Nicht bekannt

**9. Wichtige Inkompatibilität**

Nicht bekannt

**10. Dosierung und Dauer der Anwendung**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage wird direkt auf die Wunde appliziert und bei Bedarf mit einer saugenden Kompresse abgedeckt. Die Fixierung kann mit Hilfe von Heft-/Rollenpflaster erfolgen. Die ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben. Durch diese Ruhigstellung der Wunde wird der Wundheilungsprozess gefördert.

**11. Sonstige Hinweise**

Die Öl-in-Wasser-Emulsion ist neutral. Die zu versorgende Wunde kann zusätzlich mit für die Therapie geeigneten Mitteln behandelt werden. Eine Wechselwirkung mit Wundreinigungsmitteln bzw. Antiseptika ist nicht zu erwarten. ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage kann einfach auf das notwendige Maß zugeschnitten werden ohne zu fransen oder anzufasern.

**12. Haltbarkeit**

ADAPTIC\* nichthaftende Wundauflage ist ein steriles Einmalprodukt und 5 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar. Das Haltbar-

keitsdatum ist aufgedruckt auf jeder Verpackung.

**13. Lagerungshinweise**

Trocken, bei Raumtemperatur, vor direkter Sonne geschützt und in der Originalverpackung. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung unbeschädigt und ungeöffnet ist.

**14. Packungsgrößen (Inhalt)**

Bestell Nr.	PZN	Größe cm	Stck./ Spender
2012 Z	1228159	7,6 x 7,6	10
2012	4589188	7,6 x 7,6	50
2013	3135309	7,6 x 20,3	108
2014	1231339	7,6 x 40,6	36
2015 Z	1228165	7,6 x 20,3	10
2015	2252562	7,6 x 20,3	24
2019	6641036	12,6 x 12,75	12

**15. Name und Anschrift des Herstellers:**

Johnson & Johnson Medical Inc., Arlington/Tx, USA

**Europäischer Repräsentant:**  
Johnson & Johnson Medical Ltd., Gargrave, England

**Vertrieb in Deutschland:**

Ethicon GmbH  
Johnson & Johnson  
Wound Management  
Oststraße 1  
D-22844 Norderstedt  
Telefon: (040)52207-0  
Telefax: (040)52207-401  
E-Mail: servic2@medde.jnj.com

**16. Stand der Information:**

Februar 2002

**17. ADAPTIC\* ist ein Medizinprodukt Klasse IIb**

**CE 0120**

\* Trademark