

1. Produktbezeichnung

NU-DERM* Hydrokolloidverband

2. Produktzusammensetzung

NU-DERM* besteht aus:

- Hydrokolloidmatrix (Carboxyl-Methyl-Cellulose)
- Semipermeabler Polyurethanfilm

3. Anwendungsgebiete

NU-DERM* ist bei schwach bis mäßig exsudierenden chronischen Wunden sowie Druckgeschwüren indiziert.

NU-DERM* Thin ist bei oberflächlichen, nicht bis schwach exsudierenden Wunden, postoperativen Wunden sowie Abschürfungen indiziert.

4. Gegenanzeigen

Nicht indiziert für Hautgeschwüre mit Beteiligung von:

- Muskeln, Sehnen und Knochenbeteiligung
- Konsultation des Arztes bei Läsionen, die durch Tuberkulose, Syphilis oder Pilzinfektionen, Tumoren und Wunden, die hochgradig infektiösgefährdet sind
- Verbrennungen dritten Grades
- Wunden mit klinischen Infektionszeichen

5. Nebenwirkungen

Bei ordnungsgemäßer Anwendung sind bisher keine bekannt.

6. Wechselwirkungen

Bisher sind keine bekannt.

7. Wichtige Inkompatibilitäten

Bisher sind keine bekannt.

8. Dosierung und Dauer der Anwendung

NU-DERM* ist gemäß der zu versorgenden Wunde auszuwählen. Dabei sollte der Verband den Wundrand überlappen. Zunächst sollte nur der große Teil des Schutzpapiers von der Rückseite entfernt werden. Den

Verband dann mittig in der Wunde platzieren. Anschließend den kleinen Teil des Papiers entfernen und den Verband vollständig fixieren.

Schwer zu versorgende Wunden sollten mit den Sondergrößen (Sacrum, Ferse oder Ellbogen) versorgt werden.

Ein Verbandswechsel ist nach einer maximalen Verweildauer von sieben Tagen erforderlich, oder wenn die maximale Absorptionskapazität erreicht ist. Ein Verbandswechsel hat unverzüglich zu erfolgen, wenn es zu Leckagen kommt.

9. Produkteigenschaften

NU-DERM* ist ein steriler Hydrokolloidverband, der durch Schaffung eines feuchten Wundmilieus den Heilungsprozess unterstützt. Das zusätzlich erreichte autolytische Débridement schafft eine optimale Bedingung für die Granulation. Es kann zu Beginn der Therapie zu einer optischen Vergrößerung der Wunde führen.

NU-DERM* verbindet sich mit dem Wundexsudat zu einem weichen Gel. Durch den Matrix-Aufbau des hydrokolloidalen Materials wird das meiste Gel beim Verbandswechsel mit dem Verband entfernt. Eventuell verbleibende Reste werden aus der Wunde gespült. Das Hydrokolloid kann ohne Vorwärmen direkt auf die Wunde appliziert werden.

NU-DERM* lässt sich durch seine gute Formbarkeit optimal dem Applikationsort anpassen. Die glatte Oberfläche minimiert die Gefahr von Reibungen sowie die Angriffsfläche für Scherkräfte. Aufgrund der abgerundeten Ecken wird ein Verkleben mit dem Bettzeug oder Patientenkleidung sowie ein Aufrollen der Ecken verhindert.

NU-DERM* ist wasserdicht und ermöglicht ein Abduschen der Patienten. Ferner ist die Wunde vor bakteriellen Kontaminationen geschützt. Durch die hohe Absorptionskapazität kann das Wundexsudat gut aufgenommen werden.

Die innovative Verpackung ermöglicht es, schnell und einfach das Produkt zu nutzen, sowie Kosten zu reduzieren und den Lagerplatz optimal auszunutzen.

10. Sonstige Hinweise

NU-DERM* enthält kein Latex, Gelatine oder tierische Produkte.

11. Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise

Trocken, unter 25° C lagern. Solange die Primärverpackung unbeschädigt ist, ist das Produkt steril.

12. Darreichungsformen und Packungsgrößen

NU-DERM* ist in folgenden Größen lieferbar:

Bestell-Nr.	PZN	Größe	Inhalt OP
HCB102	0328232	5 cm x 5 cm	20 Stück
HCB204	0328249	10 cm x 10 cm	10 Stück
HCB106	0328255	15 cm x 15 cm	5 Stück
HCB108	1004738	20 cm x 20 cm	5 Stück
HCH207	0328350	Ferse/Ellbogen	10 Stück
HCS100	0328344	Sacrum	5 Stück
HCT101 (thin)	0328367	10 cm x 10 cm	10 Stück

13. Medizinproduktklasse und CE Zeichen

Medizinprodukt der Klasse IIB, CE 75619

14. Stand der Informationen

Juli 2003

15. Name und Anschrift des Herstellers

ETHICON Inc.
JOHNSON & JOHNSON Wound Management
Somerville, NJ 08876
USA

14. Vertrieb

ETHICON GmbH
Johnson & Johnson Wound Management
Oststraße 1
22844 Norderstedt
Telefon: (040) 522 07-0
Telefax: (040) 522 07-401
NU-DERM* Infoline zum Nulltarif: 0800-100 13 07
E-Mail: mservic2@medde.jnj.com

*Trademark